

CosySecure

Solution de maintien pour sécuriser le nouveau-né
dans l'incubateur de transport Nite



CosySecure est un matelas à dépression qui assure le maintien du nouveau-né dans l'incubateur pendant le transport. L'enfant est sécurisé en cas de freinage brutal, de virage rapide ou de collision, conformément à la norme EN1789 : 2021.

CosySecure est un produit Ego Zlin (Perinatalogical Bag) distribué par Médipréma

SÉCURITÉ DU NOUVEAU-NÉ

Le matelas de transport CosySecure est constitué de microbilles en polystyrène qui s'agglomèrent sous l'effet du vide.

La dépression rigidifie le matelas et crée ainsi un **cocon sécurisé adapté au corps de l'enfant**.

Pour une sécurité maximale, un bandeau de fixation permet de maintenir la tête de l'enfant.

HOMOLOGATION 10G

Ce système, testé et validé par crash-test 10G, garantit un maintien optimal de l'enfant pendant le transport d'urgence interhospitalier.

CONFORT DU NOUVEAU-NÉ

Le matelas de transport est renforcé de **coussinets en mousse** pour un meilleur confort du nouveau-né.

Médipréma recommande l'usage de draps non-tissés à usage unique pour améliorer le confort thermique de l'enfant tout en protégeant sa peau.

SURVEILLANCE ET ACCÈS À L'ENFANT

Le matelas de transport CosySecure possède des découpes latérales qui facilitent l'**accès au corps de l'enfant pendant le transport**.

Les équipes médicales peuvent surveiller l'état du patient et assurer le maintien des mesures thérapeutiques.

Pour des situations d'urgence nécessitant un accès rapide à l'enfant, les ceintures de sécurité sont déverrouillables rapidement par simple pression.



INSTALLATION RAPIDE

Le matelas à dépression est fixé sur le plateau de l'incubateur Nite par des sangles ajustables.



ACCESSOIRES



Livré dans un sac de rangement avec :
- pompe à dépression
- kit de réparation
- sangles de fixation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2 TAILLES DE MATELAS :

● Grand modèle :



● Petit modèle :



Réf. 5231	Matelas de transport CosySecure - Grand modèle (avec poignées)
Dimensions générales LxlxH	Déplié : 125 x 71,5 x 5 cm
Poids max du bébé	5 Kg
Taille max du bébé	55 cm
Conditionnement	Livré dans un sac de rangement avec : - 3 sangles de fixation dont 2 avec boucles - 1 pompe à dépression - 1 kit de réparation (valve, rustines, spatule, colle)

Réf. 5230	Matelas de transport CosySecure - Petit modèle (sans poignée)
Dimensions générales LxlxH	Déplié : 91 x 65 x 5 cm
Poids max du bébé	2 Kg
Taille max du bébé	35 cm
Conditionnement	Livré dans un sac de rangement avec : - 2 sangles de fixation avec boucles - 1 pompe à dépression - 1 kit de réparation (valve, rustines, spatule, colle)

Certifications	Marquage CE Dispositif médical classe I Garanti sans latex Homologué 10G
----------------	---

Sacs périnatologiques (Perinatalogical Bags) Ego Zlin, distribués par :



ZA Node Park Touraine - 470 rue Gilles de Gennes - BP 8 - 37310 TAUXIGNY - FRANCE
Tél +33 (0)2 47 28 47 87 - Fax +33 (0)2 47 27 35 85 - www.mediprema.com

